

Acuvue RevitaLens

Multi-Purpose Disinfecting Solution

Für Silikonhydrogel- und weiche Kontaktlinsen

ANWEISUNGEN ZUR KONTAKTLINSENDESINFEKTION

1. Waschen Sie Ihre Hände mit Seife und warmem Wasser und trocknen Sie sie mit einem fusselfreien Tuch ab, um die Gefahr einer Infektion zu verringern.
2. Reinigen und desinfizieren Sie Ihre Kontaktlinsen nach dem Abnehmen, indem Sie 3 oder mehr Tropfen der Lösung auf eine Seite der Kontaktlinse geben.
3. REIBEN Sie die Kontaktlinse vorsichtig 2 bis 4 Sekunden lang von der Mitte bis zum Rand
Achten Sie darauf, nicht in kreisförmigen Bewegungen zu reiben.
4. Drehen Sie die Kontaktlinse um und wiederholen Sie Schritt 2 und 3.
5. SPÜLEN Sie die Kontaktlinse von beiden Seiten 5 Sekunden lang mit frischer Lösung ab. Legen Sie die Kontaktlinsen in den Kontaktlinsenbehälter und füllen Sie diesen mit der Lösung. Verschließen Sie den Behälter fest.
6. BELASSEN Sie die Kontaktlinsen mindestens 6 Stunden zur Desinfektion, Reinigung und Entfernung von Proteinen in der Lösung.

Achtung : Wechseln Sie Ihr Kontaktlinsenpflegesystem nicht ohne Rücksprache mit Ihrem Kontaktlinsenspezialisten.