

## LensAlert – Zeit für den Wechsel

### Gebrauchsanweisung

- Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung, und ziehen Sie den Plastikstreifen an der Vorderseite des Geräts mit der Aufschrift „PULL“ heraus. Damit wird die Batterie aktiviert.
- Entfernen Sie den Aufkleber „14 30“ auf der Anzeige. In der Anzeige blinken die Zahlen „00 00“.
- Die **linke Anzeige** steht für die Dauer der Benutzung der **Kontaktlinsen**. Sie wird mit dem linken Druckknopf unter dem Hinweispfeil „Lens“ in der Wanne geschaltet. Drücken Sie den Knopf, und halten Sie ihn fest. Die Anzeige zählt von „60“ abwärts. Lassen Sie den Knopf bei Erreichen der empfohlenen Tragedauer Ihrer Linsen los, bei Monatslinsen z.B. bei „30“. Nun zählt die Anzeige jeden Tag eine Zahl rückwärts bis „0“ aufleuchtet. **Jetzt ist es Zeit, neue Kontaktlinsen einzusetzen.**
- Die **rechte Anzeige** steht für die Benutzungsdauer des **Linsenbehälters**. Hier ist die maximale Anzeige „99“. Drücken Sie den rechten Druckknopf mit dem Pfeil „Case“ und halten ihn fest, bis die empfohlene Zahl für die Benutzungsdauer Ihres Linsenbehälters erscheint, z.B. 90 Tage. Die Anzeige zählt jeden Tag rückwärts bis „0“ aufleuchtet. Jetzt wissen Sie, dass Sie einen neuen Linsenbehälter nehmen müssen, der alte ist aus Hygienegründen bakteriologisch nicht mehr zu empfehlen.
- Nach dem Einsetzen der neuen Linsen stellen Sie die linke Anzeige wieder auf „30“, und Sie sind sicher, stets hygienisch einwandfreie, neue Kontaktlinsen im Auge zu haben. Ebenso verfahren Sie mit der rechten Anzeige für den Linsenbehälter.
- Bei 3-Monats-Tauschlinsen benutzen Sie nur die rechte Anzeige, da Tragezeit der Linsen und Benutzung des Behälters gleichermaßen 90 Tage betragen.
- Wenn in der Anzeige das Batteriezeichen aufleuchtet, müssen Sie ein neues Gerät oder eine neue Batterie benutzen. Die Batterie hält ca. 12 Monate.



**Jetzt wissen Sie, wann es Zeit für den Wechsel ist:  
Stets hygienisch einwandfreie Linsen und Linsenbehälter.**

\*) Alert (engl.) = Alarmsignal  
Lieferung ohne Linsenbehälter.  
Stand 18.12.07